Anleitung zum Einlesen einer Lizenz in Lactate EXPRESS V43.

1. Klicken Sie auf "Menü".

Lactate EXPRESS V4.3.0.20 Andreas Adam	Einzelauswertung Trainingskalender Te	stvergleiche
* Klick	Laktat (mmoul)	
Dateneingabe	= 85 0-	00'00 Zett (hhrmn:ss)
	Schwellenwerte	IAI

2. Klicken Sie auf "Optionen"

mesi	ics			Deutsch (Deutschl
Neuer Test Legen Sie eine neue Diagnostik an	Test laden Laden Sie eine Diagnostik	Test speichern Speichern Sie diese Diagnostik	Drucken Drucken der Ergebnisse	
Optionen Legen Sie hier die Optionen fest	UPDATES Prüfen auf Programmupdates	Hilfe Onlinehilfe und Handbuch]	

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Lizenz"

🤔 Optionen	a X
Programmeinstellungen	
Datenbankpfad	
C:\mesics\Lactate EXPRESS 40\Data\	8
Logo: Logo:	Laden X
🖂 Dataidiates zum Öffenn von Teste verwanden	
Rundung Pulsbereiche 1	
Version Lactate Scout	Klick
Lactate Scout V1-3	\backslash
(Abbrechen	Lizenz

4. Klicken Sie auf "Lizenzpakete"



5. Öffnen Sie die Lizenzdatei, die Sie per E-Mail von mesics erhalten haben.

Lizenzen Registrierungen Lizenzpakete	Verso	
	jerman	vn 1.0.0 ~
Kunde Lizenzinformationen Kunde Name Straße Hausnummer PLZ Stadt D 63:246383-f863-4c72-9e4a-3c8f983b93ec		

6. Überprüfen Sie, ob die Lizenz gültig ist. Gültige Lizenzen werden mit einem grünen Häkchen angezeigt.

Kunden-Lizenzmanagement			9 <u>223</u>		×
Lizenzen Registrierungen	Lizenzp	k Z Jakete	erm Germ	Versor nan	n 1.0.0 ~
Lactate EXPRESS ©		Info Name			
Lactate EXPRESS 01.01.2023 - 31.12.2023	0	Max Mustermann Lange Str. 1 Köln Lizenznehmer Andreas Adam Kundenschlüssel 3774426228			
		Überprüfen Sie Ihre Daten			